



# Aanmeetinstructies

## Curetex<sup>®</sup> bovenlichaambandages

**VARODEM<sup>®</sup>**

The Compression Company

# Aanmeetinstructies

## Curetex<sup>®</sup> bovenlichaam (thorax)



### Stap 1. Omvangsmaat cR: Oksel-schouder

Vraag de patiënt de arm op te tillen en leg het meetlint onder de oksel. Vraag de patiënt om de arm te laten hangen voor de grootste omvang en meet de omtrek over de schouder. Laat de centimeter los en laat het gewicht van de centimeter de spanning bepalen op het meetlint. Let op dat de arm naar beneden hangt. Meet schuin richting het BH-bandje voor de grootste omvang.



### Stap 2. Omvangsmaat cN, boven de borst

Leg het meetlint onder de oksel door. U hoeft het meetlint niet strak aan te trekken. Zorg ervoor dat het meetlint ook aan de achterzijde recht ligt. Leg het meetlint goed hoog in de oksel. Vraag de patiënt goed in en uit te ademen, neem de grootste omvang bij inademing.

**Tip:** Zet daar waar u de omvang meet ook gelijk een streepje aan de zijkant van het lichaam met een huidpotlood of huidstift. Dit maakt het makkelijker op de lengtematen te meten.



### Stap 3. Omvangsmaat cM, onder de borst

Zorg ervoor dat u deze omvang meet met de BH aan of door de borst(en) op te tillen. Vraag ook hier aan de patiënt om in en uit te ademen, neem de grootste omvang.



### Stap 4. Omvangsmaat cT

**cT = taille-omvang** - Vraag de patiënt de handen in de taille te zetten en meet hier de omvang of meet de omvang taille 25 cm uit de oksel.



### Stap 5. Omvangsmaat cH

**cH = heupomvang** - Meet deze omvang op het breedste punt. Dit hoeft niet de plek te zijn waar de bandage zal eindigen.



### Stap 6. Lengtemaat IMN (meten van de zijkant lichaam)

**IMN** - De afstand tussen boven de borst en onder de borst. Hoe groter de cupmaat, hoe groter deze maat.

#### Richtlijn

Cup A = 9 -10 cm  
Cup B = 10 -12 cm  
Cup C = 12 -14 cm  
Cup D/E = 14 -16 cm  
Cup >E = max. 18 cm

**Tip:** Indien u niet zeker bent over de cupmaat, geef dan ook de omvang over het grootste gedeelte van de borst op (circulair gemeten op tepelhoogte). Meet deze omvang altijd met BH aan of met de borsten in gelifte positie.



### Stap 7. Lengtemaat IMT

**IMT** - De afstand tussen onder borst en de taille. De IMN en de IMT zijn bij elkaar opgeteld gemiddeld 25 cm.



### Stap 8. Lengtemaat ITH

**ITH** - De afstand tussen de taille en het einde van de bandage.

**Tip:** Tel alle lengtematen bij elkaar op en dan komt u gemiddeld op 40 cm uit. Meet de bandage lang genoeg aan zodat de patiënt de bandage in de broek kan stoppen om terugkruipen naar boven te voorkomen.



### Modelkeuze (links: 601, rechts: 603)

**Model 601**- bandage met brede schouderbanden (8 cm), een hoge halslijn en inzetbaar bij grotere omvangen en bij grote cupmaten.

**Model 603** - bandage met smalle schouderbanden (4 cm), een diepe halslijn, inzetbaar tot cupmaat D.


# Op speciaal verzoek te bestellen: thoraxbandages met mouwen.



Begin met het meten van de lengte van het mouwtje vanaf het AC-gewricht oftewel knobbeltje op de schouder tot het einde van het mouwtje.

Meet de mouw niet te kort op i.v.m. het terugkruipen van het materiaal richting de oksel. Gemiddelde lengte is 20 - 25 cm.

**Tip: Een mouw wordt standaard afgewerkt met een kanten randje. Indien u geen kanten afwerking op de mouwen wenst, gelieve dit aan te geven bij uw bestelling.**

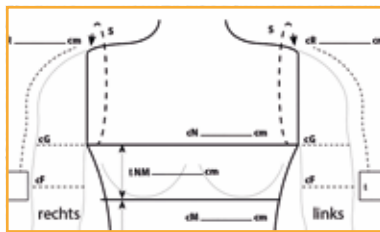

## Meet de volgende omvang

**cG** - Omvangen bovenarm ter hoogte van de oksel.

**cF** - De omvang daar waar de mouw eindigt.

Indien u een thoraxbandage met mouwen besteld, vraag dan het speciale bestelformulier op via de Varodem® helpdesk en laat u verder informeren over de modellen met mouwen.

## Informeer eerst via 0475 589 302.

**Neem voor vragen contact met ons op  
via 0475-589302. Wij helpen u graag!**

**Varodem BV**  
Postbus 4717  
6085 ZG Horn  
T: 0475 589 302  
F: 0475 582 779  
E: [info@varodem.nl](mailto:info@varodem.nl)  
I: [www.varodem.nl](http://www.varodem.nl)

**Volg onze officiële kanalen:**

