

Aanmeetinstructies

Curetex[®] onderlichaambandages



VARODEM[®]

The Compression Company

Aanmeetinstructies

Curetex® onderlichaam



Stap 1. Het markeren van de meetpunten onderbeen

Begin met het zetten van streepjes op het onderbeen daar waar de meetpunten zitten. Doe dit aan de zijkant van het been en gebruik een speciale huidstift.

- B=** de kleinste omvang enkel
- C=** de kuitomvang, grootste omvang onderbeen.
Daar waar je een CT-broek aanmeet, pak de C-maat dan net onder het grootste punt +/- 3-4 cm.
- D=** twee vingers uit de knieholte
- E=** in de knieholte. Ongeveer 4-6 cm boven de D-maat (**zie close-up**).



Stap 2. Het markeren van de meetpunten bovenbeen

Ga verder met het zetten van de streepjes op het bovenbeen, de heup en de taille.

- F=** een handbreedte boven de patella (knie-schijf) +/- 15 cm
- G=** twee vingers uit de bilplooi
- H=** het breedste punt van de heup
- T=** de taille. Meet de taille-omvang daar waar je de broek wilt laten eindigen. Vanwege de beperkte lengte-rek van Curetex® liever een langere broek dan te kort (i.v.m. afzakken). Bij een hele grote buikomvang neem dan de taille-omvang net onder de borst.



Tip: Meet je een FT-broek aan, dan moeten de pijpjes minimaal 15 cm zijn om terugkruipen richting de lies te voorkomen.



Stap 3. Het meten van de omvangsmaten bij alle streepjes (1)

Bij Curetex® producten neem je de omvangsmaten aansluitend, dat betekent niet te los meten en ook niet te strak.


cE meten (2) - Meet de knie-omvang in licht gebogen stand. Zorg ervoor dat je centimeter in de knieholte ligt en meet dan schuin naar voren boven de patella (knie-schijf).



cH meten (3) - De enige omvang waar je echt strak mag meten is de cH, de heupomvang. Hier moet de broek namelijk blijven hangen. Op deze grootste omvang kan men doorgaans de druk ook goed verdragen. Trek de centimeter op deze maat dus goed door.



cT meten (4) - Bij het meten van de taille-omvang zet gelijk een streepje net onder je centimeter aan de voor- en aan de achterzijde van het lichaam. Dan kun je bij de volgende stappen makkelijk je lengte voor- en achterzijde broekgedeelte meten.

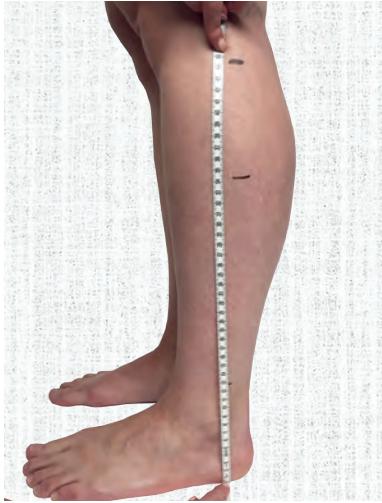

Stap 4. Het meten van de lengtematen

Meet de lengtematen vanaf de grond en aan de buitenzijde van het been. Gebruik voor het aflezen van de lengtematen je eigen markeringen/streepjes. Meet recht omhoog en niet te veel in de vorm van het lichaam.

Let op: een onderbeen is altijd langer dan een bovenbeen.

Referentiematen:

ID = 40 cm , IG = 75 cm

ID = 45 cm , IG = 80 cm




Stap 5: Broekgedeelte

Het broekgedeelte is gemiddeld 30 cm (1) ($IGT = IT \text{ min } IG$).

Een te kort broekgedeelte zorgt ervoor dat de Curetex® broek sneller gaat afzakken.



Lengte broek voorzijde (2) - gebruik je markeerpunt en begin daar met meten tot aan het kruis. De lengte voorzijde is doorgaans gelijk aan of net iets kleiner dan de IGT, dus vaak rond de 30 cm. Bij een IGT van >40 cm komt de broek vaak tot onder de borst.

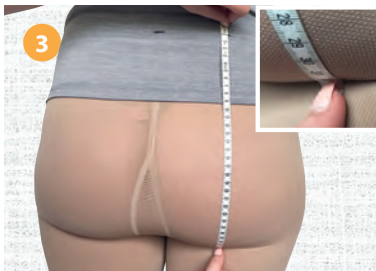

Lengte broek achterzijde (3) - gebruik je markeerpunt en meet recht over de bil tot in de bilplooï. De lengte achterzijde is vaak langer dan de voorzijde (alleen bij heren vaak niet of bij dames met een hangende buik ook niet). Maximaal 15 cm verschil tussen lengte voor- en achterzijde.

Tips Curetex® onderlichaambandages

- Curetex® wordt doorgaans gecombineerd met kousen. Een CT-broek met AD-kousen en een FT-broek met AG-kousen. Er moet altijd een stukje overlap zijn tussen de kousen en de broek. Je kunt een BT-broek ook combineren met AD-kousen.
- Curetex® is geen vervanging van therapeutische elastische kousen.
- Als optie kunt u een rits of een haak-oogsluiting kiezen in de broek voor makkelijker aan- en uittrekken. Standaard zit er geen sluiting in de broek.
- Curetex® wordt altijd in staande positie aangemeten, en niet zittend.
- Meten graag in hele maten, dus geen halve omvangsmaten of lengtematen of in decimalen achter de komma.
- Maximale maten:
cH = 150 cm
cG = 90 cm
cF = 85 cm
Bij maten groter dan bovenstaande marges is Curetex® waarschijnlijk geen geschikte optie voor de patiënt.

**Neem voor vragen contact met ons
op via 0475-589302. Wij helpen u
graag!**

Varodem BV
Postbus 4717
6085 ZG Horn
T: 0475 589 302
F: 0475 582 779
E: info@varodem.nl
I: www.varodem.nl

Volg onze officiële kanalen:

