

Hoe gebruik je een VaroBand anti-slipverband?

Het VaroBand anti-slipverband is een verband met een ultra korte lengterek en een stevige griplaag. Het product kan ingezet worden bij het fixeren van VaroCare producten en therapeutische elastische kousen in geval van afzakproblemen. Het product wordt aangebracht onder de compressiehulpmiddelen en is verkrijgbaar in beige en zwart in de afmeting 12 x 115 cm. Samenstelling: 48% nylon, 29% spandex en 50% chloropren.

Benodigheden



Voor het aanbrengen van het anti-slipverband heb je nodig:
VaroBand anti-slipverband, klittenbandjes (deze zijn inbegrepen)
en een schaar.

VaroBand anti-slipverband aanbrengen op het onderbeen



Stap 1: Breng het anti-slipverband circulair aan net onder de knie met de zwarte griplaag aan de binnenzijde tegen de huid.



Stap 2: Knip het anti-slipverband op maat. Markeer de goede lengte op het product en knip het verband voorzichtig op maat.



Stap 3: Maak het anti-slipverband vast met twee meegeleverde klittenbandjes.



Stap 4: Trek de TEK aan of leg de VaroCare om het been. Zorg voor voldoende overlapping met het anti-slipverband. Het verband kun je ongeveer 0,5 cm boven het compressiehulpmiddelen uit laten komen.



Stap 5: Rol het verband na gebruik altijd netjes weer op, zodat de sliplagen niet op elkaar komen. Dit kan namelijk scheuren in het materiaal voorkomen.

VaroBand anti-slipverband aanbrengen op het bovenbeen



Stap 1: Breng het anti-slipverband circulair aan net onder de bilplooï met de zwarte sliplaag aan de binnenzijde tegen de huid.



Stap 2: Knip het anti-slipverband op maat. Markeer de goede lengte op het product en knip het verband voorzichtig op maat.



Stap 3: Maak het anti-slipverband vast met twee meegeleverde klittenbandjes.



Stap 4: Trekt de TEK aan of de VaroCare om het been. Zorg voor voldoende overlapping met het anti-slipverband. Het verband kun je ongeveer 0,5 cm boven het compressiehulpmiddelen uit laten komen.



Stap 5: Rol het verband na gebruik altijd netjes weer op, zodat de sliplagen niet op elkaar komen. Dit kan namelijk scheuren in het materiaal voorkomen.