



U bent in het bezit gekomen van een VaroCare hand- en/of armverband.

Met deze aantrekinstructies leggen wij graag uit hoe u VaroCare het beste bij uzelf kunt aanbrengen voor een optimaal resultaat.





VaroCare handverband

1. Het handverband wordt geleverd met losse klittenbanden omdat deze zowel links als rechts gedragen kunnen worden. Bevestig de klittenbanden aan de banden van het handverband. Indien het etiket aan de buitenzijde zit, kunt u deze voorzichtig verwijderen. Er worden ook losse pelotten meeleverd om de druk op de handrug te verhogen (optioneel).

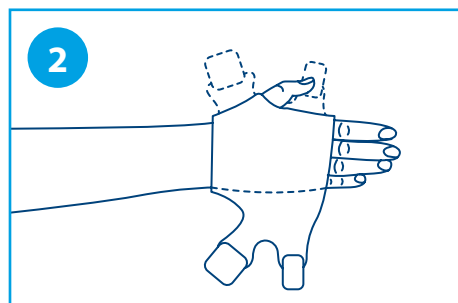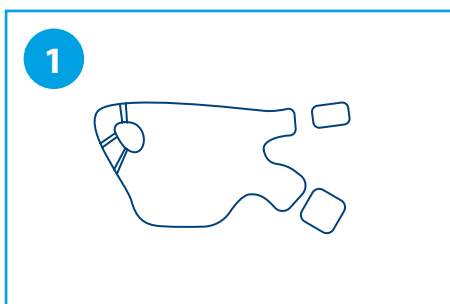

2. Steek uw duim door de opening van het handverband. Het VaroCare handverband bestaat uit een smalle en een brede band. De smalle band hangt aan de kant van de pink en de brede band bij de pols. Sla het verband vervolgens via de handpalm om uw hand. De klittenbanden horen altijd te sluiten op de handrug. Sluiten de klittenband in uw handpalm? Dan dient u het handverband binnestebuiten te draaien.



3. Mocht het handverband minder comfortabel aanvoelen na verloop van tijd, controleer dan of de druk nog goed is en of er geen plooien in de stof zijn ontstaan. Maak het klittenband los en bevestig de banden opnieuw.

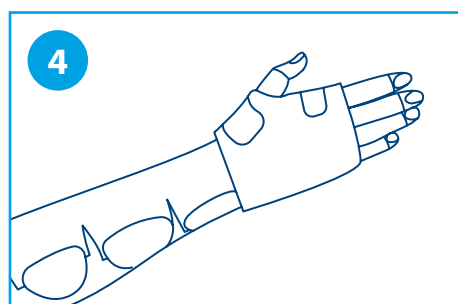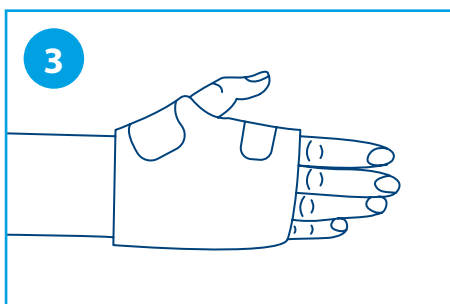

4. Als u het handverband combineert met een armverband, breng eerst het armverband aan en zorg ervoor dat het handverband over het armverband valt. Maakt u ook gebruik van een VaroSilk handverband? Trek dan eerst het VaroSilk handverband aan en vervolgens het VaroCare handverband.


VaroCare armverband (links en rechts verschillend)

1. Begin met uw arm door de ingenaaide liner te schuiven en trek het armverband omhoog tot deze op de juiste hoogte zit. Zorg ervoor dat het etiket en de siliconenband altijd aan de bovenzijde zitten. U kunt het armverband ook aantrekken zonder gebruik te maken van de ingenaaide liner. Leg in dit geval het verband plat neer en leg uw arm op de liner. U heeft in dit geval een tweede persoon nodig om te helpen.

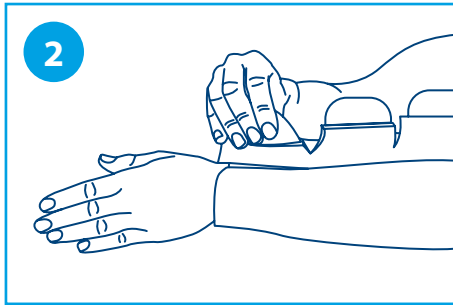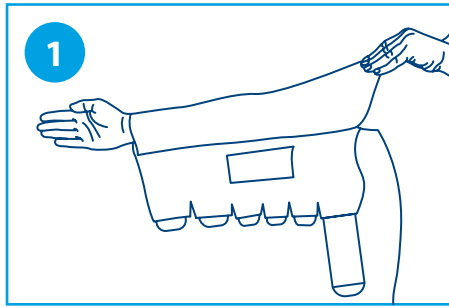

2. Buig vervolgens uw arm in een 90 graden positie en trek de banden met klittenband met spanning over de arm en bevestig deze met het klittenband. Begin met de band bij de pols en werk zo naar boven. Bij de band ter hoogte van de elleboog kunt u uw arm strekken om de band met rek te bevestigen.

3. Aan de bovenste band zit een extra bandje vast. U kunt dit bandje gebruiken als hulp om onder de arm door de bovenste band op spanning te bevestigen. Als alle banden vast zitten raden wij aan om alle banden nogmaals na te lopen om ze op de juiste positie te zetten. De banden dienen aan te sluiten. Zorg dat er geen grote rimpels in de stof ontstaan tijdens of na het aantrekken.

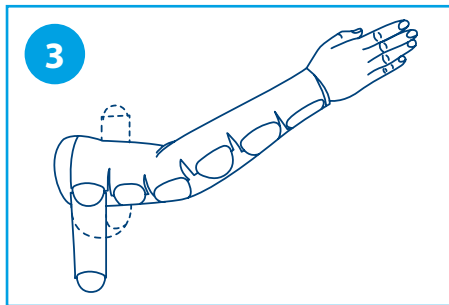

VaroCare Tips

- Was de VaroCare producten regelmatig op 40 graden. De verbanden drogen snel. Ze kunnen in de wasmachine, gebruik hiervoor bijv. een wasnetje. Drogen gedurende de nacht (niet op een warmtebron). Verwijder de klittenbanden van de bandage voor het wassen. De klittenbanden zelf kunt u met wat water en een borsteltje met de hand schoon maken.
- Gebruik het VaroSilk handverband om stuiving naar de vingers te voorkomen of om oedeem in de vingers te reduceren. De VaroSilk dient los bijbesteld te worden, dit wordt aangegeven op het bestelformulier.