



U bent in het bezit gekomen van een VaroCare knie- en/of bovenbeenverband.

Met deze aantrekinstructies leggen wij graag uit hoe u VaroCare het beste bij uzelf kunt aanbrengen voor een optimaal resultaat.





VaroCare knieverband

1. Het knieverband wordt geleverd met los klittenband aangezien deze zowel links als rechts gedragen kan worden. Bevestig de losse klittenbanden aan het verband, twee klittenbanden per band. Het etiket moet aan de bovenzijde zitten.

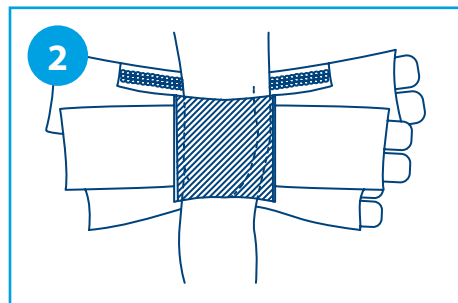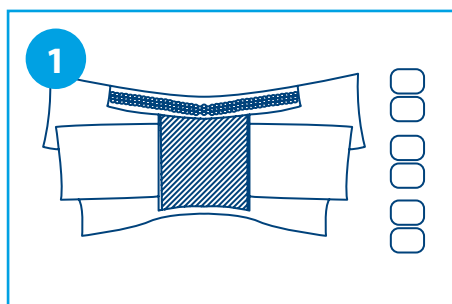

2. Schuif uw voet en been door de ingenaaide liner of leg u been bovenop de liner.



3. Begin met het vastmaken van de middelste band. Trek de banden met spanning over het de knie en ze vast met het klittenband. Zorg ervoor dat het klittenband naar buiten sluit. Vervolgens zet u eerst de onderste en dan de bovenste band vast.

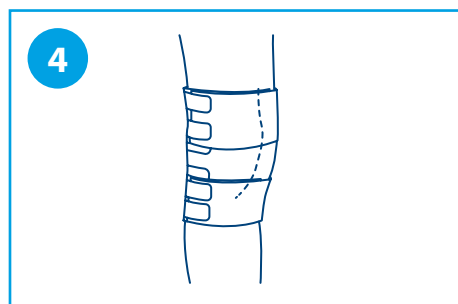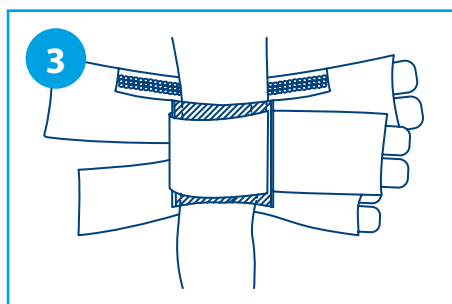

4. Controleer of de opening aan de achterzijde bij de knieholte op de juiste plaats zit. Deze opening zorgt ervoor dat het mogelijk blijft om te knie goed te kunnen buigen.


VaroCare bovenbeenverband (links en rechts verschillend)

1. Maakt u gebruik van de ingenaaide liner, steek uw been in de liner en positioneer het verband op de juiste hoogte. Maakt u geen gebruik van de ingenaaide liner, leg dan uw been op het verband en positioneer dit op de juiste hoogte. Zorg ervoor dat het etiket altijd aan de binnenzijde zit en de siliconenband naar u toe is gericht.

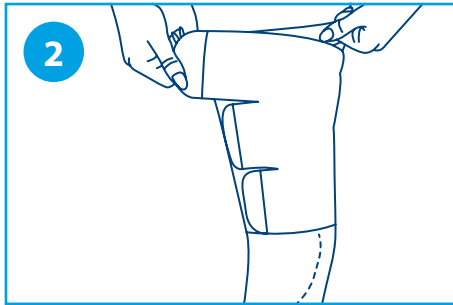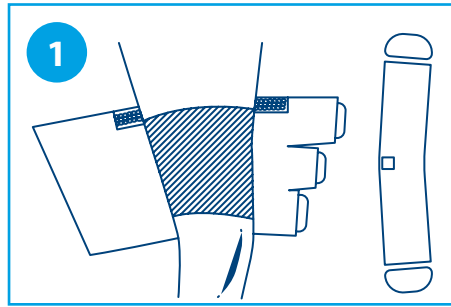

2. Begin met het vastmaken van de banden net boven de knie. Trek hiervoor de flap zonder klittenband over het been en sluit de eerste rij klittenbanden met spanning. Door met de ene hand het verband aan de bovenkant vast te houden, kunt u met de andere hand met gelijke rek de banden vastmaken. Werk zo omhoog tot aan de laatste band in de lies.

3. Bevestig de losse band aan de achterzijde van het bovenbeenverband met behulp van klittenband. Trek de banden diagonaal over de voorzijde van het bovenbeen en bevestig deze met klittenband. Deze extra band zorgt voor extra fixatie.

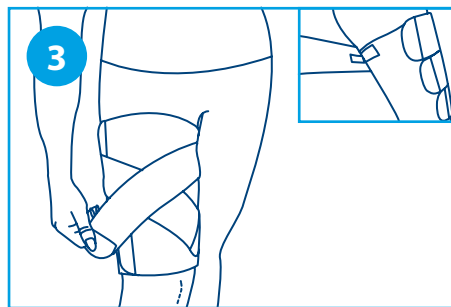

VaroCare Tips

- Was de VaroCare producten regelmatig op 40 graden. De verbanden drogen snel. Ze kunnen in de wasmachine, gebruik hiervoor bijv. een wasnetje. Drogen gedurende de nacht (niet op een warmtebron). Verwijder de klittenbanden van de bandage voor het wassen. De klittenbanden zelf kunt u met wat water en een borsteltje met de hand schoon maken.
- Bij het aanbrengen van het VaroCare® zwachtelsysteem voor het gehele been adviseren wij om allereerst het onderbeenverband aan te brengen, vervolgens het voetverband en aansluitend het bovenbeenverband om af te sluiten met het knieverband.
- Het VaroCare bovenbeenverband is standaard voorzien van een ingewerkte liner en een siliconenband. Bestel waar nodig een heupband of anti-slipverband, dit voorkomt het eventuele afzakken van een bovenbeenverband.